

## **MANUAL DE MONTAJE DE PANTALLA DE PROTECCIÓN.**


1. COLOCACIÓN DE LÁMINA DE ACETATO EN LA RANURA DEL SOPORTE DE POLIESTIRENO.



2. SE COLOCAN LOS CLAVOS ATRAVESANDO EL POLIESTIRENO Y ACETATO. APRETAR CON FUERZA.



3. CON LA GOMA ELÁSTICA SE AJUSTA AL PERÍMETRO DE LA CABEZA, ADMITIENDO VARIAS POSICIONES.

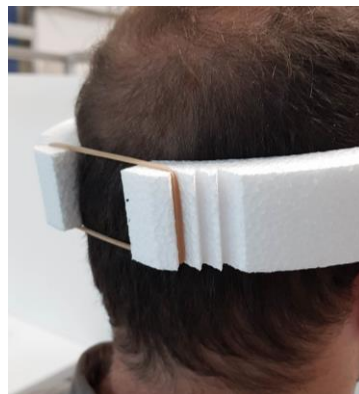

## RECOMENDACIONES PARA LA REUTILIZACIÓN DE LA PANTALLA:

La desinfección de los componentes de la pantalla de protección debe hacerse sumergiendo todos los componentes en una disolución de lejía con agua de una concentración comprendida entre el 2 % y el 5 %.

(Aproximadamente es una parte en volumen de lejía por cada de 20 a 40 de agua)

Lejía (partes)	Agua (partes)	Porcentaje
1	40	2,5 %
1	20	5,0 %

Partes en volumen

La manipulación deberá hacerse con protección en las manos, con guantes de vinilo o látex si es posible, desechándolos después.

### POSIBLES ALTERNATIVAS

1.- SUMERGIR LA PANTALLA PROTECTORA SIN DESMONTAR EN DICHA DISOLUCIÓN. Mínimo durante cinco minutos. Luego aclarar y dejar secar.

2.- DESMONTAR LA LAMINA DE VINILO Y SUMERGIR IGUALMENTE TODAS LAS PIEZAS SEPARADAMENTE PARA POSTERIORMENTE MONTARLA. Mínimo durante cinco minutos. Luego aclarar y dejar secar.

3.- SI SE TIENE REPUESTO DEL SOPORTE DE EPS. Desechar el EPS usado y sustituirlo por uno nuevo, una vez desinfectada la lámina de acetato, la goma y los clavos de fijación.

El lavado de manos con agua y jabón, incluidas las muñecas, siempre es recomendable al finalizar y, en su caso, en fases intermedias.